



# SINH<sub>2</sub>OX PEAR

## Istruzioni per l'uso

made in Italy for sinh2ox health & care srl Torino, Italy®



## **SINH2OXHEALTHANDCARE srl**

via ferdinando bocca 11, 10132 torino, italy

p. iva 10867140013

capitale sociale € 40.000 i.v.

iscrizione Registro imprese CCIAA: # TO-1168289 del 21/01/2013 - Torino

☐ +39 333 6246062 ☐ [info@sinh2ox.com](mailto:info@sinh2ox.com)

Prima di utilizzare il prodotto, leggere queste istruzioni con attenzione e conservare questo manuale per futura consultazione.

### **Istruzioni di sicurezza**

Le informazioni di questa sezione sono fornite per evitare danni alle persone e alle cose.

La nostra pera è realizzata con materiale atossico, morbido e resistente ed è sicura per l'uso quotidiano.

Sinh2ox-pear è sterilizzabile a freddo con i prodotti normalmente utilizzati per la sterilizzazione di biberon e tettarelle (Milton o simili).

Da utilizzare per la pulizia del naso e per ridurre il rischio di raffreddore, allergia e sinusiti incluso:

- secchezza nasale
- naso chiuso e senso di peso facciale
- sintomi nasali dell'influenza e del raffreddore
- irritazione nasale da polvere, inquinamento, peli di animale, pollini e fumo
- esiti di interventi chirurgici sul naso e sui seni paranasali (**solo su indicazione del vostro specialista**)


### **Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso**

**Attenzione: Per evitare danni, non utilizzare sinh2ox-pear**

- se il naso è completamente bloccato
- se hai un'infezione all'orecchio o senso di ovattamento all'orecchio
- non utilizzarla per bambini minori dei 6 anni

**Sinh2ox-pear non è studiato per essere utilizzato da persone (inclusi i bambini) con impedimenti fisici o mentali e con scarsa capacità o esperienza senza la supervisione e l'aiuto di una persona responsabile della loro sicurezza**

- Per evitare danni, non usare la pera subito dopo chirurgia nasale o sinusale
- Per evitare danni, non utilizzare sinh2ox-pear in caso di ferite esposte o sanguinamento del naso o dei seni
- Utilizzare solo secondo le istruzioni. Questa pera è adatta solo per lavaggio nasale. Non utilizzare per le orecchie, sotto la lingua o altre zone delicate
- Non utilizzare con acqua fredda o senza soluzione salina. Non riempire la pera con acqua a temperatura superiore i 38°C
- Utilizzare con 500 cc di acqua tiepida precedentemente bollita (assicurarsi che si sia raffreddata prima dell'uso) o di acqua minerale naturale

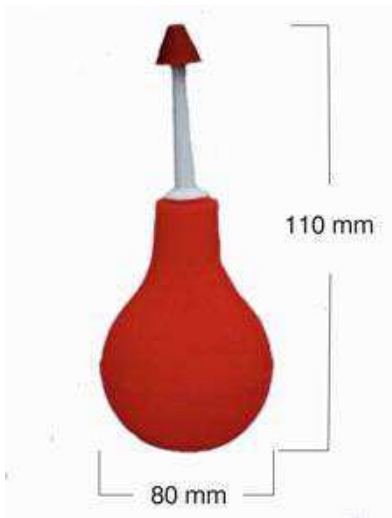

- Per evitare danni, non utilizzare l'apparecchio indossando piercing nasali
- Non aggiungere oggetti estranei alla soluzione salina
- Sinh2ox-pear non è intesa per uso medicale

**Mantenere la pera pulita. Assicurarsi di eliminare l'acqua residua dopo l'uso. Trascurare di rispettare questi semplici accorgimenti può produrre danno alla salute per la possibile comparsa di muffe o batteri e la comparsa di cattivo odore.**

### **Precauzioni**

Evitare che i bambini giochino con sinh2ox-pear


### **Specifiche**

Capacità: circa 250 ml

Dimensioni: 85 (L) x 85 (P) x 110 (A) mm

Peso: ± 93 g. (incluso il puntale)

### **Identificazione delle parti dell'irrigatore nasale**

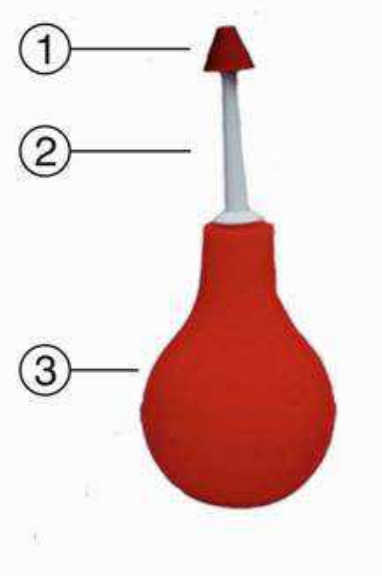

1. Puntale nasale
2. Cannula rigida
3. Pera

Per il migliore risultato, effettuare il lavaggio nasale 1-2 volte al giorno. Se il passaggio nasale è completamente bloccato o se vi è ovattamento auricolare smettere il lavaggio nasale e consultare il medico.

### Nota

Dopo l'utilizzo possono rimanere residui di liquido nella pera, nella cannula rigida o puntale morbido. Non vi sono rischi per la salute se si seguono i consigli di manutenzione.

## Preparazione dell'irrigatore per l'uso

1. Per eseguire il lavaggio inserire il puntale sulla cannula rigida e questa nell'apposito foro della pera
2. versare in un contenitore o in un bicchiere 250 ml di acqua bollita e lasciata raffreddare. Si può usare anche acqua minerale naturale senza bollirla
3. aprire una bustina di sale (non fornita con la Sinh2ox-pear) e versarne il contenuto nel bicchiere.  
**N.B.** In questo modo si prepara una soluzione salina **ipertonica**, che è considerata quella ideale per il lavaggio, l'igiene e la salute del naso. E' possibile preparare una soluzione meno concentrata diluendo il contenuto della bustina in 500 ml (**soluzione lievemente ipertonica**) oppure in 700 ml(**soluzione isotonica**)

4. Mescolare bene per sciogliere il prodotto



5. Riscaldare la soluzione nel forno a microonde per alcuni secondi (temperatura ideale tra i 30° e 37°)

## Eeguire il lavaggio nasale con Sinh2oxpear

1. Lavarsi le mani prima di ogni utilizzo
2. Aspirare con la pera il liquido pronto per l'uso
3. In piedi davanti al lavandino inclinare la testa in avanti ed appoggiare la punta soffice ad una narice, aprire la bocca, premere la pera con delicatezza fino al suo svuotamento. **La soluzione uscirà dalla narice opposta**
4. Ripetere le medesime operazioni per l'altra narice



Un lavaggio ideale richiede almeno 250 ml di soluzione salina per ciascuna narice  
Lavare con cura la Sinh2ox-pear dopo ogni utilizzo aspirando acqua pura e sciacquando la pera

## Manutenzione di sinh2ox-pear

- Dopo ogni lavaggio lavare bene e sciacquare la pera, la cannula rigida ed il puntale in silicone
- Lasciare asciugare prima di riporre il tutto nell'apposita borsa in plastica o simili per non esporlo alla polvere
- Una volta alla settimana disinfettare lasciando immersi la pera ed i diversi componenti in una soluzione per la disinfezione a freddo tipo quelle comunemente utilizzate per i biberon e le tettarelle e reperibile in Farmacia
- Se viaggiate togliete sinh2ox-pear appena possibile da borse e bagagli per prevenire la
- contaminazione batterica o da muffe.

**Questo prodotto è studiato esclusivamente per uso domestico non medicale**

## SINH2OX HEALTH AND CARE srl

via ferdinando bocca 11, 10132 torino, italy

p. iva 10867140013

capitale sociale € 40.000 i.v.

iscrizione Registro imprese CCIAA: # TO-1168289 del 21/01/2013 - Torino

☐ +39 333 6246062 ☐ info@sinh2ox.com ®