

SINH₂OX WASHER



Manuale d'uso



SINHOX[®]
HEALTH & CARE

Prima di utilizzare il prodotto,

leggere queste istruzioni con attenzione e conservare questo manuale per futura consultazione

Istruzioni di sicurezza

Le informazioni di questa sezione sono fornite per evitare danni alle persone e alle cose.

L'irrigatore nasale è privo di BPA e di conservanti ed è sicuro per l'uso quotidiano. Da utilizzare per la pulizia del naso e per ridurre il rischio di raffreddore, allergia e sinusiti incluso:

- secchezza nasale
- naso chiuso e senso di peso facciale
- sintomi nasali dell'influenza e del raffreddore
- irritazione nasale da polvere, inquinamento, peli di animale, pollini e fumo
- esiti di interventi chirurgici sul naso e sui seni paranasali (solo su indicazione del vostro specialista!!!)

Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso

Attenzione

- Per evitare danni non utilizzare questo apparecchio se il naso è completamente bloccato
- Per evitare danni non utilizzarlo se hai un'infezione all'orecchio o senso di ovattamento all'orecchio
- Per evitare danni non utilizzarlo per bambini minori dei 6 anni

Questo apparecchio non è studiato per essere utilizzato bambini e da persone con impedimenti fisici o mentali e con scarsa capacità o esperienza. In questi casi sono necessari la supervisione e l'aiuto di una persona responsabile della loro sicurezza

- Per evitare danni non usare l'apparecchio subito dopo chirurgia nasale o sinusale se non su consiglio del vostro specialista che vi fornirà tutti i consigli del caso
- Per evitare danni non utilizzare l'apparecchio in caso di ferite esposte o sanguinamento del naso o dei seni
- Utilizzare solo secondo le istruzioni. Questo apparecchio è adatto solo per lavaggio nasale. Non utilizzare per le orecchie, sotto la lingua o altre zone delicate
- Non utilizzare con acqua fredda o senza soluzione salina. Non riempire il serbatoio con acqua a temperatura superiore i 40°C
- Utilizzare con acqua tiepida del rubinetto, acqua distillata o precedentemente bollita (assicurarsi che si sia raffreddata prima dell'uso), acqua minerale naturale
- Non utilizzare questo apparecchio se non funziona correttamente, se è caduto o è danneggiato, se è stato immerso in sostanze liquide di qualsiasi tipo

- non immergere in acqua
- per evitare danni non utilizzare l'apparecchio indossando piercing nasali
- non aggiungere oggetti estranei alla soluzione salina
- L'apparecchio non è inteso per uso medicale
- Mantenere l'apparecchio pulito. Assicurarsi di eliminare l'acqua residua e di far funzionare qualche secondo l'apparecchio dopo l'uso. **Trascurare di utilizzare questi semplici accorgimenti può produrre danno alla salute e lo sviluppo di muffe o batteri.** Ciò può produrre cattivo odore e cattivo funzionamento.

Avvertenze sulle batterie

- Inserire le batterie correttamente controllando le estremità + e -
- Rimuovere le batterie esaurite e smaltirle correttamente
- Rimuovere le batterie quando l'apparecchio non viene utilizzato per lungo tempo
- Non buttare le batterie nel fuoco

Non manomettere

Non manomettere mai l'apparecchio, non smontarlo o tentare di ripararlo

Precauzioni

Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio



SINH2OX HEALTH AND CARE srl
via ferdinando bocca 11, 10132 torino, italy
p. iva 10867140013
capitale sociale € 40.000 i.v.
iscrizione RI- CCIAA: # TO-1168289 del 21/01/2013 - Torino
t. +39 333 6246062 e: info@sinh2ox.com
www.sinh2ox.com - seguiteci su facebook e you tube

La confezione

Sinh₂ox washer è contenuto in una comoda busta in plastica.
Insieme all'apparecchio (non sono fornite le batterie) troverete:

- 2 puntali di colore differente
- 15 bustine di sali per preparare la soluzione salina
- 1 tubo di aspirazione di ricambio

Specifiche

Alimentazione: 3 batterie AA-4.5V DC


Peso: circa 265 g senza batterie

Capacità: circa 300 ml


Dimensioni: 73 (L) x 89 (P) x 244 (A) mm



Identificazione delle parti dell'irrigatore nasale

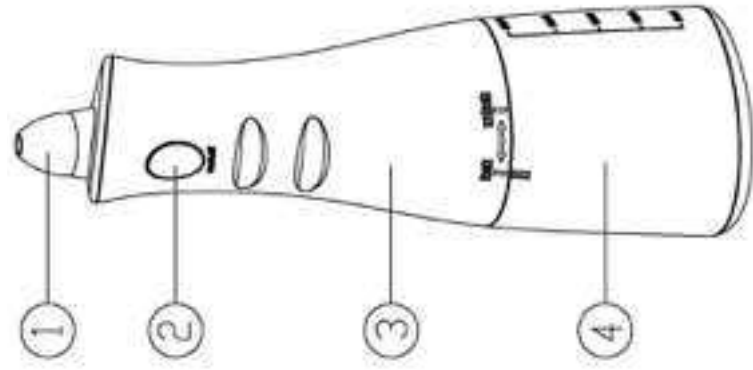

1. Puntale nasale
2. Interruttore
3. Unità principale
4. Serbatoio
5. Coperchio delle batterie
6. Vite del coperchio delle batterie
7. Tubo di aspirazione dell'acqua
8. Batterie AA (non incluse)

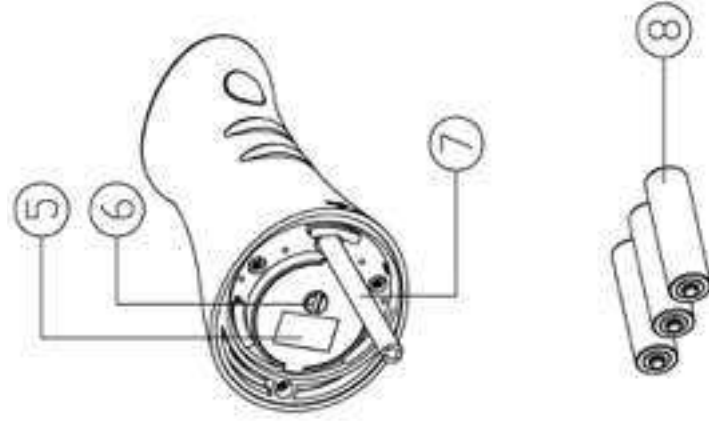


Per il migliore risultato, effettuare il lavaggio nasale 1-2 volte al giorno. Iniziare con un getto di acqua tiepida in cui è stata disciolta 1 bustina di sali. Se il passaggio nasale è completamente bloccato o se vi è ovattamento auricolare smettere il lavaggio nasale e consultare il medico.


Nota

Dopo l'utilizzo possono rimanere residui di liquido nell'apparecchio (unità principale, serbatoio, tubo di aspirazione), non vi sono rischi per la salute se sono stati seguiti i consigli di manutenzione.

Preparazione dell'irrigatore per l'uso

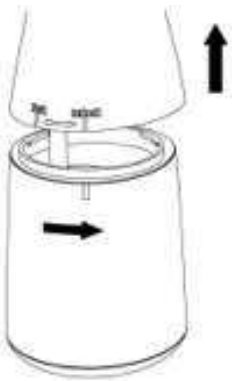


disinserire il serbatoio blu dalla unità principale ruotandolo in senso antiorario

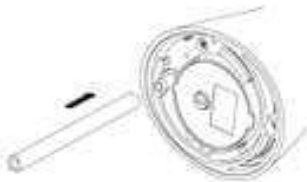

inserire il tubo di aspirazione se non è attaccato all'unità principale



svitare la vite del coperchio della batteria posizionato sull'unità principale utilizzando una moneta o un cacciavite (non rimuoverla completamente). Nota: la vite rimarrà inserita nel coperchio della batteria

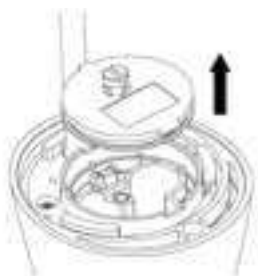


Sollevatelo delicatamente facendo leva sulla linguetta più larga.



Inserire 3 batterie AA seguendo le istruzioni di inserimento presenti nel vano (rispettate i segni + e -). USATE SOLO BATTERIE ALCALINE DI BUONA QUALITÀ. Se pensate di non usare l'apparecchio per lunghi periodi, togliete le batterie dal loro vano prima di riporre l'apparecchio. **Le perdite del liquido contenuto nelle batterie provocano al washer danni irreparabili non coperti da garanzia.**

Le pile usate devono essere smaltite negli appositi raccoglitori

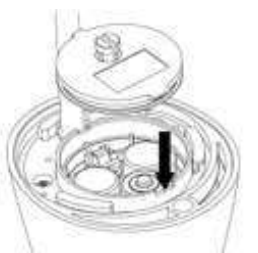


Riposizionate il coperchio inserendo per prima la linguetta più larga nella sua sede.



Spingere il coperchio con forza nel suo alloggiamento fino al suo completo inserimento. **Solo successivamente avvitate la vite**



N.B. Non forzare la chiusura con la vite ma spingere bene il coperchio con le dita prima di avvitare. **PERICOLO DI ROTTURA DEL COPERCHIO**

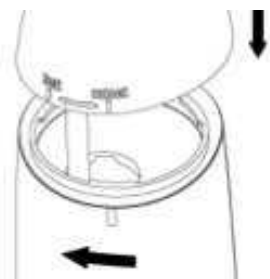


Inserire il tubo di aspirazione della unità principale nell'apposito foro presente nel serbatoio blu. Allineare la tacca presente sul serbatoio blu con la tacca di apertura sull'unità principale e ruotare in senso orario fino allo stop.



Installare il puntale in silicone soffice. Sono forniti due puntali per l'utilizzo da parte di più persone

Effettuare il lavaggio nasale con l'irrigatore nasale

Lavare con cura l'irrigatore prima del primo lavaggio

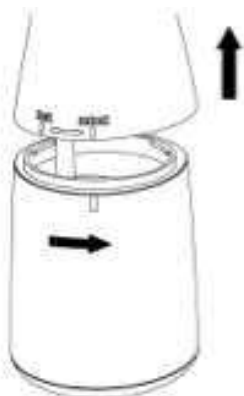

Rimuovere il serbatoio blu ruotandolo in senso antiorario dalla posizione di blocco a quella di sblocco e separarlo dalla unità principale.




Posare il serbatoio blu su una superficie piana, versare il contenuto di una bustina di sali nel serbatoio

Riempire il serbatoio blu con 250 ml di acqua. Se necessario, riscaldare in forno a microonde fino alla temperatura desiderata.

Scuotere gentilmente il serbatoio prima di rimontarlo sull'unità principale per favorire lo scioglimento dei sali.


N.B. Il contatto dei sali favorisce la ruggine delle parti metalliche e della vite di chiusura del vano batterie

massimo 30 secondi

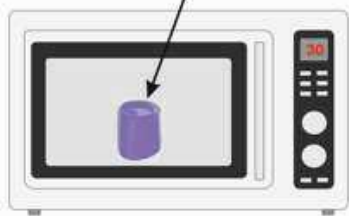

Attenzione:

- scaldare a microonde il serbatoio blu solo dopo averlo riempito con acqua
- **non utilizzare acqua a temperatura più alta di 37°**
- non lasciare in microonde più di 30 secondi

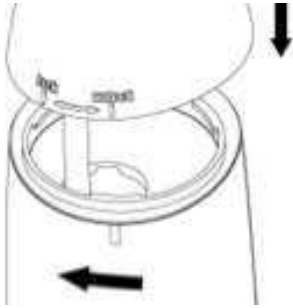

Rimontare l'irrigatore inserendo il tubo di aspirazione bianco nel foro del serbatoio blu. Allineare la tacca sul serbatoio blu con la tacca di sblocco sull'unità principale e ruotare in senso orario per fissare il serbatoio all'unità principale.



- In piedi davanti al lavandino inclinare la testa in avanti ed appoggiare la punta soffice ad una narice.
- tenere l'apparecchio verticale.
- aprire la bocca,
- premere il pulsante di accensione ed attendere che il flusso d'acqua fuoriesca dalla narice opposta.
- irrigare la narice finchè il liquido contenuto nel serbatoio non è terminato (circa 30-40 sec)
- lasciare sgocciolare il naso per qualche secondo poi soffiare con gentilezza per eliminare il muco, i batteri e l'eccesso d'acqua dal naso.
- ripetere dall'altro lato.

Fermare l'irrigazione se si avverte fastidio, dolore o pressione.

Manutenzione

Puntale soffice

Rimuoverlo dall'unità principale, lavarlo con acqua e poi asciugarlo

Serbatoio

dopo l'irrigazione: rimuovere il serbatoio e sciacquarlo con acqua corrente per eliminare tutti i residui di sale. Riempirlo con acqua pura, rimontarlo e far funzionare l'apparecchio per qualche secondo, svuotarlo e metterlo a scolare per asciugare.

Il serbatoio può essere anche pulito in lavapiatti.

Unità principale

Siacquare e rimuovere eventuale sporco utilizzando detersivo per piatti poi asciugare con un panno asciutto. Far funzionare l'apparecchio ancora 2-3 sec finché non esca più acqua.

- **Accertarsi che il coperchio delle batterie sia ben chiuso.**
- Non lavare a temperatura superiore a 50°C.
- Non immergere l'apparecchio in acqua.
- Non lavare l'unità principale in lavastoviglie
- Rimuovere le batterie se non si utilizza per lungo tempo.

Tubo di aspirazione

Non rimuovere mai il tubo di aspirazione.

- Non è necessaria alcuna pulizia se ci si attiene alle istruzioni per la manutenzione dell'unità principale
- Non piegare il tubo di aspirazione
- Non seguire queste istruzioni può produrre malfunzionamento o rottura del tubo d'aspirazione

Il puntale soffice ed il serbatoio possono anche essere disinfettati immergendoli qualche minuto in una soluzione comunemente utilizzata per la disinfezione dei biberon per lattanti (tipo Milton, Amuchina diluita o simili)

Per la pulizia **utilizzare solo detersivi delicati**.NON usare solventi, benzina, alcol perché possono causare malfunzionamento, rottura o perdita di colore delle parti.

Avvolgere l'apparecchio in un panno prima di riporlo in una borsa o simili per il rischio di perdite di liquido.

Toglierlo da borse o bagagli appena possibile per prevenire la formazione di batteri e muffe.

Se non avete usato l'apparecchio per lungo tempo:

- riempite il serbatoio con acqua calda
- montatelo sull'unità principale e fate funzionare l'apparecchio fino a consumare tutto il contenuto del serbatoio, poi preparate il lavaggio come da istruzioni d'uso

SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO E PER LA MANUTENZIONE DEL VOSTRO APPARECCHIO GARANTIRÀ UNA LUNGA DURATA DEL PRODOTTO.

ATTENZIONE SOPRATTUTTO

- **ALLA SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE ED AL CORRETTO RIPOSIZIONAMENTO DEL COPERCHIO CHE NE CHIUDE IL VANO**

DOPO L'IRRIGAZIONE NASALE

- **SCIACQUATE SEMPRE L'UNITÀ PRINCIPALE CON ACQUA CORRENTE PER TOGLIERE I RESIDUI DI SALE E CURATE LA PULIZIA DEL SERBATOIO**
- **FATE FUNZIONARE L'APPARECCHIO PER QUALCHE SECONDO CON ACQUA CORRENTE TIEPIDA PER PULIRNE ANCHE I MECCANISMI INTERNI**
- **ASCIUGATE L'APPARECCHIO PRIMA DI RIPORLO**

GARANZIA

Il **Sinh2ox washer** è **garantito per 2 anni** con sostituzione dell'apparecchio in caso di difetti di costruzione o di rottura. Non sono coperti da garanzia i danni o malfunzionamenti causati dalla mancata osservanza delle norme d'uso, manutenzione e i danni accidentali.

In caso di rottura o malfunzionamento NON utilizzate l'apparecchio. Contattateci al nostro **numero telefonico +39 3336246062** o via **e-mail a info@sinh2ox.com**. Vi forniremo tutte le istruzioni per l'invio dell'apparecchio al nostro centro di assistenza (le spese di spedizione dell'apparecchio guasto sono a vostro carico). Verificata la natura del guasto, provvederemo a riparare l'apparecchio o a sostituirlo e ve lo rispediremo al più presto (le spese di spedizione dell'apparecchio riparato o sostituito saranno a nostro carico)

**Questo prodotto è studiato esclusivamente per uso domestico
e non è un apparecchio medicale**



SINH2OX HEALTH AND CARE srl
via ferdinando bocca 11, 10132 torino, italy
p. iva 10867140013
capitale sociale € 40.000 i.v.
iscrizione RI- CCIAA: # TO-1168289 del 21/01/2013 - Torino
t. +39 333 6246062 e: info@sinh2ox.com
www.sinh2ox.com - seguitemi su facebook e you tube
made in china for sinh2ox health & care srl - torino, italy